


ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БЕЗЧЕТКОВИ МОТОРИ MCX LED И MX2 LED

Моля, запознайте се с пълните инструкции за почистване и стерилизация. Този микроmotor се доставя НЕСТЕРИЛЕН. Моля, уверете се, че процедурата по стерилизиране е спазена преди да използвате устройството върху пациент.

1 ПОДГОТОВКА И ПОЧИСТВАНЕ

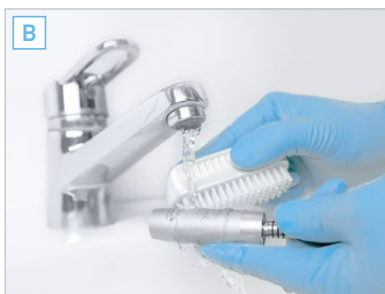

A. РАЗКАЧЕТЕ МИКРОМОТОРА ОТ ШЛАНГА

B. ПОЧИСТЕТЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА С
ТЕМПЕРАТУРА <38°C

2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



A. Дезинфекцирайте с препарат за дезинфекция на повърхности

⊘ НЕ ПОТАПЯЙТЕ във вана с
дезинфекционен разтвор

3 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



A. ОПАКОВАЙТЕ МОТОРА В ПЛИК ЗА
СТЕРИЛИЗАЦИЯ

B. СТЕРИЛИЗИРАЙТЕ СЪГЛАСНО
ИНСТРУКЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Инструменти гравирани със символ  могат да бъдат автоклавиращи на съответната температура